


Vă rugăm să citiți Ghidul de Funcționare FreeStyle sau Manualul Utilizatorului FreeStyle pentru instrucțiuni complete asupra modului de obținere a citirii glucozei din sânge. Acest ghid de referință demonstrează modul de utilizare doar a dispozitivului FreeStyle.

Faceți referire la Manualul Utilizatorului pentru informații complete referitoare la Sistemul de monitorizare a glucozei din sânge FreeStyle.

Important. Acesta este un dispozitiv de utilizare pentru o singură persoană. Dispozitivul este doar pentru utilizarea proprie și nu este potrivit pentru utilizarea utilizatorilor de asistență și îngrijire sănătate.

Folosirea dispozitivului

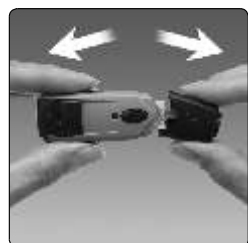

- 1 Înlăturarea capului**
Scoateți capul dispozitivului în unghi



- 2 Introduceți lanțeta**
Introduceți o nouă lanțetă FreeStyle în mod ferm în dispozitivul alb de susținere. (Împingerea lanțetei în dispozitiv poate gofra dispozitivul; acest lucru este în regulă).

Notă: Nu oferiți sau refolosiți lanțetele.



- 3 Rotiți capul rotund**
Mențineți lanțeta în mod ferm pe loc cu o mână; utilizați cealaltă mână pentru a roti capul.



- 4 Înlocuiți capul**
Înlocuiți capul până când face un clic în locul respectiv. Fiți atenți să nu atingeți acul expus al lanțetei.

Folosiți capul închis la culoare pentru testele la degete.

Important. Utilizați capul simplu pe dispozitiv pentru următoarele zone de testare: antebraț, braț superior, mână, coapse și pulpe.



- 5 Stabiliți nivelul**
Dispozitivul FreeStyle vă oferă patru setări diferite. Nivelul 1 este adâncimea mică. Nivelul 4 este cel mai adânc. Mutați discul gradat la setarea dorită după cum este arătat la fereastra indicatorului de adâncime. Pentru a înțepa degetul, se recomandă ca să începeți la Nivelul 1. Pentru braț se recomandă să începeți la Nivelul 2.



- 6 Îmbinare mâner**
Trageți mânerul de îmbinare închis la culoare până când face clic. (Poate că deja ați pus mânerul la pasul 2; este bine). Sunteți gata acum gata pentru a efectua testul glucozei din sânge.

Selectarea Zonei de Testare preferate

Atenționare: Dacă vă testați pentru hipoglicemie (glucoză scăzută în sânge), sau dacă suferiți de hipoglicemie neînștiințată, se recomandă să vă testați la degete.

Înțeparea degetului



- Selecția setarea de adâncime pe dispozitiv la Nivelul 1.
- Atingeți ușor dispozitivul (cu capul închis la culoare) contrar zonei degetului dumneavoastră.
- Apăsăți butonul de eliberare
- Strângeți ușor degetul, dacă este cazul, până când se formează o picătură de sânge de mărimea unui vârf de ac (exemplu: •)
- Faceți referire la Manualul Utilizatorului pentru informații suplimentare asupra testării cu sistemul de monitorizare a glucozei din sânge FreeStyle.

Diferențe fiziologice în circulația dintre deget și alte zone de testare precum antebrațul, brațul superior, mâna, coapsele și pulpele pot duce la diferențe ale măsurătorilor glucozei din sânge din aceste zone de testare și degetul dumneavoastră. Diferențele pentru măsurarea glucozei din sânge dintre celelalte zone de testare și degetul dumneavoastră pot fi observate după ce ați mâncat, după medicamentația cu insulină sau după exerciții.

Înțeparea antebrațului, Brațului superior, Mâinii, Coapsei sau Pulpei



Pentru a aduce sânge proaspăt la suprafața zonei de testare, frecați zona de testare viguros pentru câteva secunde până când simțiți că se încălzește. Înțepați zona de testare cu dispozitivul:

- Țineți capul împotriva marginii zonei de testare. Apăsăți butonul de eliberare. Nu ridicați.
- Continuați să mențineți dispozitivul și gradual măriți presiunea pentru câteva secunde.
- Ridicați dispozitivul drept în sus; fiți atenți să nu murdăriți eșantionul de sânge pe zona de testare.

Important. Evitați zonele cu vene evidente sau alunițe pentru a evita sângerarea excesivă.

Important. Evitați zonele unde sunt tendoane sau oase evidente (de exemplu, oasele mâinii și oasele încheieturii).

Contorul dumneavoastră FreeStyle necesită 0.3μL eșantion de sânge, la mărimea unui vârf de ac (exemplu: •)

Faceți referire la Manualul Utilizatorului pentru informații suplimentare la testare cu Sistemul de monitorizare a glucozei din sânge FreeStyle.

Înlăturarea Lanțetei



Atunci când ați terminat testarea, înlăturați lanțeta de la dispozitiv.

Scoateți capul alb care susține lanțeta până când lanțeta iese.

Scoateți lanțeta utilizată în mod corespunzător într-un recipient rezistent la înțepare.

Întreținere

Folosiți alcool izopropil sau săpun și apă pentru a șterge partea din exterior a dispozitivului. Dacă doriți, înlăturați capul, spălați-l în apă caldă și uscați-l bine.

Important: Nu scufundați corpul dispozitivului în apă sau orice alt lichid.

Adăugați Numerele de telefon pentru Asistență Clienți aici