

## MENIU PRINCIPAL POMPA DE INSULINA

### I. FUNCTIA BOLUS

- administrare de insulina – pentru masa
- pentru corectie

SEL+ACT+doza de insulina+ACT

### II.FUNCTIA DE OPRIRE A POMPEI

- pompa oprita ( oprirea bolusului sau functia ce este activa + oprirea ratei bazale ).

SEL+SEL+ACT

- repornirea pompei – SEL+ACT.

### III.FUNCTIA DE SETARE A RATEI BAZALE

- administrarea insulinei continuu , din ora in ora.

3SEL+ACT+doza de insulina pt.ora 0+ACT+setarea orei 1+ACT  
+doza de insulina pentru ora 1+ACT+setarea orei 2+ACT+doza de  
insulina pentru ora 2+ACT+.....+setarea orei 23+ACT+doza  
de insulina pt. ora 23+ACT+ACT = doza totala de insulina pe  
pompa.

- de fiecare data cind modificam rata bazala este obligatoriu sa o verificam.

#### IV.FUNCTIA DE SETARE A RATEI TEMPORARE BAZALE.

4SEL+ACT+durata de actiune+ACT+cant.de insulina pe ora+ACT

-la activarea functiei va apare afisat pe ecran – TEMP.BAZAL

-cand este activata rata bazala temporara , cea bazala este oprita.

DESELECTARE- 4SEL+ACT+aducem timpul la zero+ACT.

-dupa expirarea timpului setat , pompa reintra automat in rata bazala.

UTILIZARE- pentru perioade de efort , pentru somn de dupa-amiaza, perioade scurte de boala.

#### V.TOTAL DE INSULINA PE POMPA

-total livrat de pompa de la ora 0(12am) , pina in momentul in care am selectat functia.

-total- bolus+rata bazala.

- 5 SEL = TOTAL INSULINA.

-cu ajutorul sagetilor vom vedea cantitatea de insulina pe 7 zile in urma.

#### VI.FUNCTIA PRIME

-este utilizata atunci cind schimbam cateterul si realizeaza presiunea in el.

-utilizata pentru deblocarea cateterului cind apare alarma de

NO DELIVERY.

6SEL+ACT+5unit.de insulina+ACT+vol.rezervor+ACT.

## SET UP 1

I.FUNCTIA DE SETARE A OREI,MINUTULUI,AN,LUNA,ZI.  
7SEL+ACT+ACT+setarea orei+ACT+setarea minut+ACT+setare  
an+ACT+setare luna+ACT+setare zi +ACT.

### II.FUNCTIA DE OPRIRE AUTOMATA

-activata functia pe o anumita perioada de timp va da un semnal sonor(alarma).Daca pacientul nu apasa pe nici un buton,pompa va opri livrarea de insulina.

UTILIZARE-pentru persoane singure care se simt rau ,este folosita ca masura de siguranta.

7SEL+ACT+SEL+ACT+fixarea orei pt.care activam functia+ACT

### III.FUNCTIA DE STABILIRE A VOLUMULUI SONERIEI

7SEL+ACT+SEL+SEL+ACT+fixarea vol.soneriei+ACT

1 2 3

### IV.FUNCTIA DE AUTOTESTARE

7SEL+ACT+3SEL+ACT = pompa isi verifica toate functiile si sistemele.

UTILIZATA- daca am lovit pompa ,daca am udat-o , sau am observat ceva deosebit.

## SET UP II

### I.ACTIVAREA BOLUSULUI VARIABIL

8SEL+ACT+ACT+cu sagetile schimbam din OFF in ON+ACT  
-activarea functiei trimite in functia BOLUS , din meniu principal ,  
trei tipuri de bolusuri.

BOLUS NORMAL – administrare rapida de insulina similara cu  
cea a penului.

BOLUS SQUARE – livrare lenta , in timp de insulina.

BOLUS DUAL – livrare normala (rapida) combinata cu livrare  
lenta(in timp).

### II.BOLUS MAXIM

8SEL+ACT+SEL+ACT+schimbarea cant. Maxime pt. bolus(cu  
sagetile)+ACT.

-fixarea cant. Maxime de bolus pe care o putem administra.

### III.RATA BAZALA MAXIMA

8SEL+ACT+SEL+SEL+ACT+schimbarea cant.max.de rata bazala  
+ACT.

-cantitatea maxima de insulina pe care o putem fixa la rata bazala.

### IV.ISTORIA ALARMELOR PE POMPA

8SEL+ACT+3SEL+cu ajutorul sagetilor vedem istoria alarmelor.

### V.ACTIVAREA ANTENEI PENTRU TELECOMANDA.

-se activeaza antena telecomenzi si introducem codul personal al ei  
-fiecare pompa raspunde numai la telecomanda personala.

### VI.ACTIVAREA BOLUSULUI AUDIO PENTRU TELECOMANDA

-fixarea pasului cu care vom selecta bolusul-0.5-1.0unit.insulina

### VII.ACTIVAREA CELOR DOUA RATE BAZALE AUXILIARE

-activarea functiei ne trimite in meniul principal cele doua variante de rata bazala A si B. Cea initiala o vom gasi sub denumirea de STANDARD.

### VIII.SELECTAREA MODULUI DE SONORIZARE

-audi

-vibratie

8SEL+ACT+7SEL+ACT+cu sagetile stabilim audio sau vibratie+ACT

### IX.FUNCTIA DE BLOCARE A TASTELOR

8SEL+ACT+8SEL+ACT+cu sagetile din OFF in ON+ACT.

-activarea functiei blocheaza toate butoanele pompei.

-pentru deblocare trebuie sa navigam din nou pina in functie si schimbam din ON in OFF.

### X.FORMATUL TAMPULUI

-12 ore(am-pm)

-24ore

### XI.SETAREA CONCENTRATIEI DE INSULINA

-100 unit/ml

- 50 unit/ml