

MENIU POMPA DE INSULINA
PARADIGM 712

MENIU PRINCIPAL

I.BOLUS

II.OPRIRE

III.BAZAL

IV.PRIME

V.UTILITATI

I.FUNCTIA BOLUS

Administrare de insulina – pentru masa

- pentru corectia glicemiilor mari

ACT+ACT

A). FUNCTIA SET BOLUS – 3 ACT + doza de insulina

- apare doar cand bolusul wizard este inchis.

-realizeaza livrarea de insulina

B).BOLUS HISTORY – 2act+sageata jos+ACT.

-evidenta bolusurilor administrate.

C).BOLUS WIZARD SET UP- 2ACT+2 sageți in jos+ACT.

1.Edit Settings.

2.Rewiew Settings.

1.EDIT SETTINGS

a)activarea functiei bolus wizard.

- 2ACT+2sageți in jos+ACT+ACT -wizard+ACT+sageata ON+ACT.

b)-setarea unitatii de masura pentru carbohidrati .

-2ACT+2 sageți in jos+ACT+ACT+GRAMS+ACT.

c)-stabilirea raportului dintre 1 unit. insulina si carbohidrati

-ACT+carb.unit.+ACT.

d)-setarea unitatii de masurare a glicemiei

-ACT+BG UNITS+ACT+mg/dl+ACT

e)-stabilirea sensibilitatii.

1 unitate de insulina va scadea glicemia cu.....mg/dl.

ACT+

f)-setarea valorii tinta a glicemiei.

ACT+val.tinta a Gl.+ACT

ACESTE DATE FIIND TOATE INTRODUSE BOLUSUL WIZARD ESTE COMPLET.

2.REVIEW SETTINGS

-reafisarea tuturor datelor introdu-se in baza Wizard.

D. MAX BOLUS

-setarea cantitatii maxime de insulina ce se poate administra intr-o singura doza.

E.DUAL/SQUARE BOLUS

ACT+ON+ACT.

F.EASY BOLUS

-setarea pasului pentru easy bolus

ACT+ON+ACT

G.BG REMANDER

ACT+ON+ACT

II.FUNCTIA SUSPEND

-OPRIREA POMEI.

-oprirea pompei (oprirea bolusului sau functia ce este activata+oprirea ratei bazale).

ACT+sageata+ACT+ACT.

-REPORNIREA POMPEI.

ACT+ACT.

III.BASAL

ACT+2+sageati+ACT.

1)SET/EDIT TEMP BASAL

-setarea ratei temporare bazale.

-la activarea functiei va apare afisat pe ecran- Temp.Bazal

-cind este activata rata bazala temporara. Cea bazala este oprita.

-dupa expirarea timpului setat, pompa reintra automat in rata

ACT+durata+ACT+unit u/h+ACT

Deselectare-se aduce timpul la zero

ACT+durata+ACT+unit u/h+ACT

UTILIZARE – pentru perioade de effort, pentru somn de dupa-amiaza, perioade scurte de boala

2)SET/EDIT BASAL.

ACT+Rata Bazala+ACT+doza de insulina

oraO+ACT+setarea orei 1+ACT+doza de insulina pentru

ora1+ACT+setarea orei2+ACT+doza de insulina pentru

ora2+ACT+.....+setarea orei 23+ACT+doza de

insulina pt.ora23 +ACT+ACT=doza de insulina pe pompa.

-de fiecare data cind modificam rata bazala este obligatoriu sa o si verificam.

3)BASAL REVIEW.

-vizualizarea ratei bazale setate.

4)MAX.BASAL RATE.

ACT+doza max./ora+ACT

-fixarea cant. Maxime de bolus pe care o putem administra

5)PATTERNS.

-setarea ratelor bazale A si B.

ACT+ON+ACT

6)TEMP.BASAL TYPE.

-selectarea modului de setare a ratei bazale

-fie in unit./ora fie in procente

ACT+-insulin rate u/h+ACT.

-procente

IV.PRIME

1)FIXED PRIME

-se utilizeaza pentru realizarea presiunii pe cateter atunci cind il schimbam

-se utilizeaza pentru deblocarea cateterului cind apare alarma de NO DELIVERY.

ACT+doza de insulina pentru prime- 5 unit.+ACT.

2)REWIND

-realizarea unui prime automat,rapid.

-se utilizeaza atunci cind schimbam cateterul sau cand apare alarma NO DELIVERY(folosita pentru deblocare).

ACT+ 1 sageata

3)PRIME HISTORY

-istoria Prime

4)INSULIN TYPE

-setarea concentratiei de insulina utilizata in pompa.

-U100- actiune rapida

-U50 - actiune regular

V.UTILITIES

1)ALARM.

a)ALARM HISTORY.

-istoria alarmelor

b)ALARM TYPE.

-beep long.

-beep medium.

-beepshort.

c)AUTO-OFF

-functie de oprire automata

d)LOW RESERVOIRE WARNING

-setarea cantitatii de insulina la care poma de alarma de avertizare.

-setarea in unitate de timp a alarmei pentru rezervor.

2)DAILY TOTALS

-cantitatea totala de insulina livrata de pompa de la oraO(12am), pina in momentul in care am selectat functia.

-total=bolus+rata bazala.

-cu ajutorul sagetilor vom vedea cantitatea de insulina pe 7 zile in urma.

3)TIME/DATE

+ACT+display(12 sau

24ore)+ACT+ORA+ACT+MINUT+ACT+AN+ACT+LUNA

+ACT+ZI+ACT.

4)ALARM CLOCK

-add alarm

-delete alarm

-review alarm

5)REMOTE OPTIONS

ACT+ON+ACT+add id+ACT+cod de bare+ACT.

delete id

review id

-setarea identitatii telecomenzii.

6)METER OPTION

ACT+ON+ACT

-nu se utilizeaza la noi.

7)BLOCK

-blocarea butoanelor pompei.

ACT+ON+ACT.

DEBLOCARE- inapoi in functia Block +OFF+ACT.

8)SELFTEST

-activarea functiei realizeaza verificarea tuturor semnalelor sonore ale pompei.

9)CLEAR PUMP.

-stergerea setarilor din memoria pompei

10)LANGUAGE.

-olandeza -germana

-engleza -italiana

-franceza -spaniola

-poloneza